



Füllanleitung tragbarer Geräte Flüssigsauerstoff



Nicht rauchen!



Keine offenen
Flammen.



Auf gute
Belüftung achten.



Cremes, Fette und
Öle vom System
fernhalten.



Auf trockene
Füllanschlüsse achten.

1. Vor dem Füllen



- Trocknen Sie den Füllanschluss des Tragegerätes mit Küchenpapier ab, indem Sie dieses fingerdick zusammengerollt in das Füllloch stecken und drehend wieder herausziehen.

Die Füllanschlüsse müssen trocken sein, da Tragegerät und Standgerät durch Feuchtigkeit aneinander festfrieren können und tiefkalter Sauerstoff austreten kann.

2. Befüllung (Topfill)



- Setzen Sie das Tragegerät auf und drücken Sie es nach unten bis es einrastet.
- Halten Sie das Gerät in dieser Position und ziehen Sie zum Befüllen die Klappe an der Rückseite des Tragegeräts.
- Lassen Sie die Klappe alle 30 Sekunden in die Ausgangsposition zurückschnappen, um eine Vereisung der Klappe einzuschränken.
- Öffnen Sie die Klappe wieder, um mit der Befüllung fortzufahren.

Bitte immer den Füllvorgang komplett abschließen und nicht mehrmals in kurzen Abständen hintereinander füllen.


Befüllung (Sidefill)



- Setzen Sie das Tragegerät schräg auf den seitlichen Füllanschluss und drehen Sie das Gerät 45 Grad nach rechts bis es einrastet.
- Halten Sie das Gerät in dieser Position und ziehen Sie zum Befüllen die Klappe an der Rückseite des Tragegeräts.
- Lassen Sie die Klappe alle 30 Sekunden in die Ausgangsposition zurückschnappen, um eine Vereisung der Klappe einzuschränken.
- Öffnen Sie die Klappe wieder, um mit der Befüllung fortzufahren.

Bitte immer den Füllvorgang komplett abschließen und nicht mehrmals in kurzen Abständen hintereinander füllen.

3. Ende des Füllvorgangs

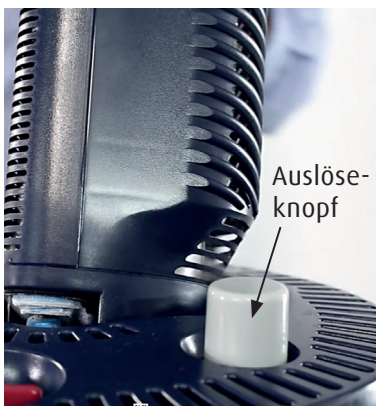

- Sobald das Tragegerät vollständig befüllt ist, ändert sich das Strömungsgeräusch deutlich und es tritt stoßweiße Sauerstoffdampf aus.
- „Topfill“: Lassen Sie die Klappe wieder zurückschnappen und ziehen Sie das Tragegerät am Trageriemen gerade nach oben ab.
- „Sidefill“: Lassen Sie die Klappe wieder zurückfallen, nehmen Sie das Tragegerät in beide Hände, drehen Sie es um 45 Grad nach links und ziehen Sie es gerade ab.
- Bei Topfill-Geräten kann hierfür ein Auslöseknopf gedrückt werden.
- Wenn sich die Geräte nicht voneinander trennen lassen, kann es sein, dass sie aneinander festgefroren sind. Warten Sie in diesem Fall 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

Nach der Befüllung kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis der Betriebsdruck im Tragegerät wieder vollständig aufgebaut ist und das Gerät den eingestellten Sauerstoff abgibt.

4. Inbetriebnahme



- Kontrollieren Sie den Füllstand, indem Sie das Gerät am Trageriemen hochheben (nahe der Anzeige) bzw. die elektronische Füllstandsanzeige betätigen.
- Der Füllstand wird über eine Waage ermittelt und bei manchen Geräten über ein LED-Display angezeigt.
- Stecken Sie den Nasenbrillenschlauch auf den dafür vorgesehenen Adapter.

Bitte beachten Sie auch die Anweisungen aus der Bedienungsanleitung.