

Making our world more productive



# Informationen für Patienten

## Clusterkopfschmerz



Linde: Living healthcare

Patientenname:

Patientennummer:



**Achtung! Sauerstoff ist stark brandfördernd!  
Nicht rauchen, offene Flammen und Zündquellen  
fernhalten!**

**Wir sind gerne rund um die Uhr für Sie da!**

## Wichtige Telefonnummern

Unser Kundenservice-Center beantwortet Ihre Fragen umfassend und fachkundig.  
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

In medizinischen Notfällen rufen Sie bitte den Notarzt oder die Rettung.

### Kundenservice-Center

24 Stunden, 7 Tage die  
Woche erreichbar unter:  
**050 4273-2200**

Für Fragen zur Bewilligung oder  
Terminvereinbarung beachten Sie  
bitte unsere Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag  
8.00 – 17.00 Uhr,  
Freitag 8.00 – 15.00 Uhr

**healthcare.at@linde.com**

### Notfallnummern

Ärztenotdienst:	<b>141</b>
Rettung:	<b>144</b>
Feuerwehr:	<b>122</b>
Polizei:	<b>133</b>
Apothekenruf:	<b>1450</b>

# Inhaltsverzeichnis

## Sicherheit und Einweisung

- 04 Kontaktinformationen Linde Healthcare
- 05 Grundausrüstung Erstversorgung
- 06 Informationen zum Einweisungsprotokoll
- 09 Sicherheitshinweise

## Anwendung

- 12 Flaschentausch LIV® Druckgasflaschen
- 15 Häufig gestellte Fragen

## Allgemeine Informationen und Services

- 16 Informationen zur Bewilligung
- 18 Services für Patienten

## Haftungsausschluss

- 20 Haftung für Schäden

Zusätzlich erhalten Sie:  
Einwilligungserklärung  
Einweisungsprotokoll  
Bedienungsanleitung

# Clusterkopfschmerz

## Kontaktinformationen Linde Healthcare

Wir sind gerne rund um die Uhr für Sie da!

Sie erreichen uns 24 Stunden, 7 Tage die Woche unter der Nummer:

# 050 4273-2200

Folgen Sie der Tonbandansage und treffen Sie anschließend die entsprechende Auswahl:

1 für die Disposition (z.B. Sauerstofflieferung, Weiterversorgung, Lieferzeiten)

2 für das Kundenservice-Center (z.B. Verordnungen, Bewilligungen, Zubehörbestellung, Urlaubsversorgung)

Halten Sie bei Anrufen an uns immer Ihre Patientenummer bereit.

### Disposition

Unsere Disposition kümmert sich um alle Sauerstofflieferungen und hilft Ihnen gerne bei allen Anliegen rund um Lieferzeiten, Terminvereinbarungen etc. weiter.

Sie können Terminvereinbarungen auch gerne per E-Mail an uns richten (bitte 2 Tage vorher bestellen):

[healthcare-dispo.at@linde.com](mailto:healthcare-dispo.at@linde.com)

Es ist wichtig, dass die Anwendung und Dosierung des Sauerstoffs wie durch den Arzt verordnet erfolgt.

### Kundenservice-Center

Unser Kundenservice-Center beantwortet alle Ihre Fragen rund um das Thema Verordnungen, Bewilligungen, Bestellung von Zubehör, Urlaubsversorgung etc. umfassend und fachkundig.

Allgemeine Anfragen: [healthcare.at@linde.com](mailto:healthcare.at@linde.com)

Für Fragen zur Bewilligung oder Terminvereinbarung beachten Sie bitte unsere Bürozeiten:

Montag bis Donnerstag 8.00 – 17.00 Uhr, Freitag 8.00 – 15.00 Uhr

**In medizinischen Notfällen rufen Sie bitte den Notarzt oder die Rettung.**

# Clusterkopfschmerz

## Grundausrüstung Erstversorgung

### Medizinische Sauerstoffflasche für Clusterkopfschmerz

- Flaschenmenge nach Verordnung  
(etwaige Maximumbestände, die vom Sozialversicherungsträger vorgegeben und kostenmäßig übernommen werden, sind zu beachten)
- 1 Stk. 10 l Flasche (medizinischer Sauerstoff) mit integriertem Ventil (stationäre Einheit)
- 1 Stk. Flaschenwagen
- 1 Stk. 2 l Flasche (medizinischer Sauerstoff) mit integriertem Ventil (tragbare Einheit)
- 1 Stk. Tragetasche für die 2 l Flasche
- 2 Stk. Sauerstoffmasken ohne Rückatmung



# Clusterkopfschmerz

## Informationen zum Einweisungsprotokoll

Bei der Einschulung haben Sie folgende Informationen erhalten:

### Allgemeine Informationen

- Die Bedienungsanleitung wurde Ihnen übergeben.
- Sie haben eine Einweisung in die Handhabung erhalten.
- Sie sind über die Sauerstoffbelieferung/-bestellung ausführlich informiert worden.
- Das Einweisungsprotokoll ist Ihnen als Kopie ausgehändigt worden.
- Die Gebrauchsinformation CONOXIA® (medizinischer Sauerstoff) wurde Ihnen übergeben.



Lesen Sie bitte die Ihnen übergebene Informationsbroschüre sowie die Bedienungsanleitung und Gebrauchsinformation sorgfältig durch.

Das Linde Healthcare Kundenservice-Center steht Ihnen 24 Stunden, 7 Tage die Woche unter der Telefonnummer [050 4273-2200](tel:05042732200) zur Verfügung.

Jegliche Datenänderungen (Adresse etc.) sowie eine bestehende Schwangerschaft müssen umgehend an das Kundenservice-Center gemeldet werden.

Die Ihnen zur Verfügung gestellte Flasche ist ein Leihgerät und Eigentum der Firma Linde Gas GmbH.

Es dürfen keine Werkzeuge bei der Handhabung verwendet werden! Für Verlust oder Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung an der Flasche entstehen, können Sie haftbar gemacht werden.

Reparaturen oder Veränderungen an der Flasche dürfen nur durch Linde erfolgen.

**Bitte unbedingt beachten:** Eine Einschulung ersetzt nicht das Lesen der Bedienungsanleitung und Gebrauchsinformation!

# Clusterkopfschmerz

## Informationen zum Einweisungsprotokoll

### Sicherheitsinformation

Sicherheit ist im Umgang mit medizinischem Sauerstoff besonders wichtig.

- Im Umgang mit medizinischem Sauerstoff gilt absolutes Rauchverbot. Die Flasche bitte unbedingt öl-/fettfrei halten und keine Haut- und Gesichtscremen sowie Duftöle verwenden.
- Das Rauchen bzw. Hantieren mit elektronischen Zigaretten ist ebenfalls verboten. Sauerstoff ist brandfördernd, darum ist jede Zündquelle verboten (z. B. Rauchwaren, Kerzen, jegliche Geräte mit glühenden Teilen).
- Personen, welche die Bedienungsanleitung nicht vollständig gelesen haben und/oder in der Handhabung nicht eingewiesen wurden, ist die Benutzung des Systems untersagt.
- Die Flasche muss immer gegen ein mögliches Umfallen gesichert werden.
- Es dürfen nur die mitgelieferten Flaschenwägen verwendet werden.
- Bitte beachten Sie, dass das Arzneimittel medizinischer Sauerstoff ein Ablaufdatum von 2 Jahren hat.
- Sie haben Informationen über die Einhaltung der verordneten Dosierung (l/min – Std./Tag) erhalten.
- Sie wissen über die Druckstandsanzeige Bescheid.



In Ihrer Informationsbroschüre finden Sie auch Sicherheitshinweise für den Gebrauch von medizinischem Sauerstoff, die Ihnen die wichtigsten Informationen bildlich veranschaulichen.

### Hygieneempfehlungen



Der Patient ist für die Sauberkeit der ihm zur Verfügung gestellten Geräte selbst verantwortlich.

Wir behalten uns vor, Schäden die durch unzureichende Hygiene bzw. unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind in Rechnung zu stellen.

# Clusterkopfschmerz

## Informationen zum Einweisungsprotokoll

### Informationen zur Versorgung

Ihre Versorgung wird werktags durchgeführt.



Für eine rechtzeitige Lieferung sollten Sie 2 Werktage vor dem von Ihnen gewünschten Liefertag bestellen, da Bestellungen für den Folgetag aus organisatorischen Gründen nicht möglich sind.

Zum vereinbarten Liefertermin muss der Patient bzw. eine Vertretung anwesend sein und die Lieferung mittels Unterschrift bestätigen.

Die Zufahrt mit einer Transportrolle oder einem elektrischen Treppensteiger muss gewährleistet sein. Die Entscheidung, was als Tragehilfe zu verwenden ist, obliegt dem Zusteller.

Beim Transport in die Wohnung des Patienten oder beim Anschluss der Flasche handelt es sich um eine reine Gefälligkeit von Linde ohne Übernahme einer Haftung. Der Patient stellt Linde insoweit nach Maßgabe dieses Punktes von allen Ansprüchen frei. Der Einsatz erfolgt daher auf alleiniges Risiko und Gefahr des Patienten.

Notversorgungen bei technischen Gebrechen (ausgenommen Zubehör) erfolgen kostenlos 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Bei kurzfristigen Bestellungen (unter 2 Tagen) oder außerhalb der normalen Liefertouren können die Mehrkosten an den Patienten weiterverrechnet werden.



# Clusterkopfschmerz

## Sicherheitshinweise

### Immer zu beachten



Reiner Sauerstoff verursacht eine sehr viel höhere Brandgefahr als Luft. **Rauchen verboten!** Gilt auch für andere Personen, während Sie das Sauerstoffgerät in Gebrauch haben.



Gerät von offenem Feuer oder Flammen fernhalten, da auch bei Nichtgebrauch Sauerstoff abgegeben wird.



Stellen Sie die Geräte niemals in die Nähe eines Vorhanges. Legen Sie keine Kleidung, Decken oder Gardinen auf das Sauerstoffgerät. Die Materialien könnten sich bei einer undichten Stelle mit Sauerstoff anreichern und leichter entzünden.



Türen innerhalb der Wohnung während des Gebrauchs offen lassen.



Die Flaschen müssen entweder liegen oder gegen Umfallen gesichert aufrecht stehen. Kontrollieren Sie immer den Halteriemen auf Beschädigungen. Im Falle einer Beschädigung darf dieser sofort nicht mehr verwendet werden.



Öle und Fette (Hautcreme, Vaseline etc.) vom Gerät und Zubehör fernhalten. Sichern Sie sich ab, dass Ihre Hände sauber und trocken sind. Bitte nur empfohlene Gesichtscremen verwenden.



Der Flaschenwagen darf immer nur mithilfe des Handgriffs an eine andere Stelle bewegt werden. Ziehen Sie sich nie am Handgriff, an der Flasche selbst oder dem Halteriemen für die Flasche hoch. Dies ist nicht dafür ausgelegt und es besteht Unfallgefahr.

# Clusterkopfschmerz

## Sicherheitshinweise

### Während der Anwendung



Bedienungsanleitung und Gebrauchsinformation aufmerksam und vollständig vor Gebrauch der Sauerstoffflasche und deren Zubehör lesen. Beachten Sie besonders die Hinweise neben den "Achtung"-Symbolen in den Informationen zum Einweisungsprotokoll.




Befestigen Sie die Sauerstoffmaske am Sauerstoffausgang der Flasche.



Vergewissern Sie sich, dass der Durchflussregler auf „0“ ist, bevor Sie das Flaschenventil langsam gegen den Uhrzeigersinn öffnen.



Stellen Sie den Durchflussregler auf die von Ihrem Arzt verordnete Durchflussrate. Kontrollieren Sie danach die Schlauchverbindungen auf undichte Stellen.

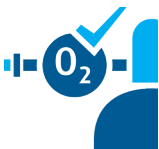

Sie können zur Kontrolle den Sauerstofffluss am Schlauchende in einem gefüllten Wasserglas sichtbar machen. Es müssen sich Blasen bilden. Wenn sich wenig oder keine Blasen bilden, überprüfen Sie Schlauch und Anschlussstellen auf Undichtheiten.

### Nach der Anwendung



empty full

Überprüfen Sie den Inhalt der Flasche am Manometer des Druckreglers. Nie die Flasche vollständig entleeren. Belassen Sie beim Wechsel der Flaschen immer eine Restmenge Sauerstoff in der Flasche.

# Clusterkopfschmerz

## Sicherheitshinweise



Reinigen Sie regelmäßig die Sauerstoffflasche. Verwenden Sie nur trockene, öl- und fusselfreie Lappen, um den Behälter oder das Zubehör zu reinigen.

### Bei Fragen oder Problemen



Bei Fragen und Problemen rufen Sie uns an!  
Bitte reparieren Sie Ihr Equipment niemals selbst!

**050 4273-2200**

# Clusterkopfschmerz

## Flaschentausch LIV<sup>®</sup> Druckgasflaschen



Nicht rauchen!



Keine offenen  
Flammen.



Auf gute  
Belüftung achten.



Cremes, Fette und  
Öle vom System  
fernhalten.



Auf trockene, saubere  
Anschlüsse achten.



- 1 Ein-/Aus-Schalter
- 2 Druckmanometer (Inhaltsanzeige)
- 3 O<sub>2</sub>-Entnahme
- 4 Anschluss für Sauerstoffmaske

# Clusterkopfschmerz

## Flaschentausch LIV<sup>®</sup> Druckgasflaschen

### 1. Vor dem Austausch

- Achten Sie darauf, dass die in Verwendung befindliche Sauerstoffflasche auf dem Flaschenwagen steht und somit gegen Umfallen gesichert ist.

### 2. Flaschentausch

- Wenn der Zeiger am Druckmanometer 10 bis 30 bar anzeigt, sollte ein Flaschentausch erfolgen.
- Lösen Sie vorsichtig die Schnalle des Halteriemens und kontrollieren Sie diesen auf Beschädigungen.
- Nehmen Sie bitte erst jetzt die leere Sauerstoffflasche vom Flaschenwagen.
- Dann setzen Sie die neue Flasche auf den Wagen.
- Ziehen Sie die Schnalle des Halteriemens ausreichend fest an, um die Flasche gegen Umfallen zu sichern.
- Entfernen Sie die Schutzhülle.



### 3. Inbetriebnahme

- Drehen Sie den Ein-/Aus-Schalter maximal auf.



# Clusterkopfschmerz

## Flaschentausch LIV<sup>®</sup> Druckgasflaschen

→ Schließen Sie nun eine Sauerstoffmaske an.



→ Drehen Sie die O<sub>2</sub>-Entnahme auf die gewünschte Stufe.





# Clusterkopfschmerz

## Häufige Fragen

### Weshalb bekomme ich keinen Sauerstoff durch die Sauerstoffmaske?

- Überprüfen Sie, ob die Flasche geöffnet ist.
- Überprüfen Sie mit Hilfe des Druckreglers, ob die Flasche noch Sauerstoff enthält und kontaktieren Sie Linde Healthcare, falls die Flasche leer sein sollte.
- Überprüfen Sie auch die Schlauchverbindung der Sauerstoffmaske. Eventuell hat sich ein Anschluss oder ein Verbindungsstück gelöst.

### Kann der Sauerstoff in der Sauerstoffmaske unangenehm riechen?

Nein, Sauerstoff ist absolut geruchsneutral. Allerdings sollten neue PVC-Schläuche und Masken nach dem Auspacken ca. 1 Stunde gelüftet werden, damit sich ein möglicher Geruch der Weichmacher verflüchtigen kann. Tauschen Sie Ihre Maske regelmäßig aus.

# Clusterkopfschmerz

## Informationen zur Bewilligung

Gerne erledigen wir für Sie die Administration mit Ihrer zuständigen Krankenkasse. Wir bemühen uns, für die uns vorliegende Verordnung eine Bewilligung und somit die Kostenübernahme durch Ihren Krankenversicherungsträger zu erwirken. Diese Kostenübernahme liegt zum Zeitpunkt der Belieferung – d. h. nur mit dem Verordnungsschein des Arztes – noch nicht vor.

Damit Sie jedoch Ihre Sauerstofftherapie so rasch wie möglich beginnen können, beliefern wir Sie gerne vorab mit dem verordneten Produkt.

**Wir weisen darauf hin, dass wir – im Falle einer Nichtbewilligung Ihrer Sauerstofftherapie – die zwischenzeitlich entstandenen Kosten an Sie weiterverrechnen müssen.**

Bei den meisten Krankenkassen wird die Therapie nur befristet bewilligt, das bedeutet, dass diese danach in regelmäßigen Abständen verlängert werden muss. Dafür benötigen wir von Ihnen in den nachstehend angeführten Intervallen einen aktuellen Verordnungsschein. Die Bewilligungsintervalle ärztlicher Verordnungen zu Clusterkopfschmerz finden Sie in der Tabelle auf der nächsten Seite.

**Bitte senden Sie diesen Verordnungsschein ausschließlich an folgende Adresse:**

Linde Gas, Linde Healthcare  
Modecenterstraße 17, Objekt 2/1. OG  
1110 Wien

Wir weisen Sie darauf hin, dass alle nicht benötigten Flaschen samt Zubehör so rasch wie möglich retourniert werden müssen. Anderenfalls werden die angefallenen Mietkosten pro Tag von der Krankenkasse nicht übernommen!

# Clusterkopfschmerz

## Informationen zur Bewilligung

### Bewilligungsintervalle ärztlicher Verordnungen zu Clusterkopfschmerz

Krankenkasse	Bewilligungsdauer	Verlängerung für Weiterverordnung ausgestellt von	max. Flaschenanzahl im Patientenbestand**
BVAEB-OEB	unbefristet	Neurologe/Psychologe/ Prakt. Arzt	2
ÖGK Burgenland	Erstversorgung 3 Monate/ Weiterverordnung 3 bis 6 Monate	Neurologe/Psychologe	
ÖGK Kärnten	12 Monate	Neurologe/Psychologe	
ÖGK NÖ	Erstversorgung 3 Monate/ Weiterverordnung 6 Monate/danach 12 Monate	Neurologe/Psychologe	2
ÖGK OÖ	pro Flasche 1 Verordnungsschein	Neurologe/Psychologe/ Prakt. Arzt	
ÖGK Salzburg	12 Monate	Neurologe/Psychologe/ Prakt. Arzt	
ÖGK Steiermark	unbefristet	Neurologe/Psychologe/Prakt. Arzt	
ÖGK Tirol	12 Monate	Neurologe/Psychologe/ Prakt. Arzt	2
ÖGK Vorarlberg	unbefristet		2
KFA	bis 31.12.	Neurologe/Psychologe	
SVS-LW	unbefristet		
SVS-GW	unbefristet	Neurologe/Psychologe/ Prakt. Arzt	2
BVAEB-EB	unbefristet	Neurologe/Psychologe/Prakt. Arzt	
LKUF	bis Ende des Jahres	Neurologe/Psychologe	

# Clusterkopfschmerz Services für Patienten

## Website und Webshop

Unsere Website inkl. Webshop bietet Ihnen ausführliche Informationen und eine Vielzahl an ausgewählten Produkten für Ihre Sauerstofftherapie.

Klicken Sie rein, stöbern Sie durch unser Sortiment und entdecken Sie alles rund um Ihre Sauerstofftherapie.

Wir freuen uns auf Sie!

[www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)



## MOXI® – Die App für Sauerstoffpatienten

Sie wünschen sich eine Erleichterung im Alltag und möchten zu Ihrer Sauerstofflieferung immer am aktuellen Stand sein? Linde bietet einen Informationsservice, welcher Sie aktiv über Ihre Lieferung informiert und Ihnen den Alltag mit einer Sauerstofftherapie vereinfacht.

Alle Informationen rund um die App finden Sie auf [www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)



# Clusterkopfschmerz

## Services für Patienten

### Erfüllen Sie sich Ihren Urlaubstraum

Wenn aus ärztlicher Sicht keine Einwände gegen eine Reise bestehen, können Sie jederzeit unbesorgt Ihren Urlaub planen und antreten. Wir sorgen für die optimale Sauerstoffversorgung, damit Ihrer Reise nichts im Wege steht.

Weitere Informationen finden Sie auf: [www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)

Für eine Kostenauskunft bzw. zur Bestellung Ihrer Urlaubsversorgung wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center unter **050 4273-2200** oder [healthcare.at@linde.com](mailto:healthcare.at@linde.com).



### Selbsthilfegruppen

Sie sind nicht alleine – Selbsthilfe kann eine wichtige Unterstützung zur Therapie sein. Sie erfahren Verständnis für Ihre Situation und können sich mit Gleichbetroffenen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Selbsthilfegruppen richten sich nicht nur direkt an Betroffene, sondern auch an deren Familien und Angehörige.

[www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)

### Weitere Services von Linde Healthcare

- Musterbriefe für Ihre Versicherung zur Meldung Ihrer Sauerstofftherapie
- Die Patientenmappe in digitaler Form
- Umfangreiches Kontaktformular um alle Ihre Fragen zu beantworten
- Häufig gestellte Fragen
- Downloadbereich
- und vieles mehr



Das alles und noch viele weitere wertvolle Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)

# Clusterkopfschmerz

## Haftung für Schäden

Wirkt Linde über ihre vertraglichen und gesetzlichen Pflichten hinaus beim Transport in die Wohnung des Patienten oder beim Anschluss der Flasche mit, so handelt es sich hierbei um eine reine Gefälligkeit ohne Übernahme einer Haftung.

Der Patient stellt Linde insoweit nach Maßgabe dieses Punktes von allen Ansprüchen frei. Dies gilt insbesondere für unvermeidbare Beschädigungen, Verschleiß und Abnutzung an den Treppenstufen, Treppengeländer, am Bodenbelag, Teppichen, Wandputz, Möbeln etc. durch Einsatz eines Treppensteigers. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um CE zugelassene Geräte handelt, die aber für einen Einsatz auf Holzböden nicht geeignet sind! Der Einsatz erfolgt daher auf alleiniges Risiko und Gefahr des Patienten. Mit Ausnahme von Personenschäden haftet Linde nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.



# Clusterkopfschmerz

## Notizen

# Clusterkopfschmerz

## Notizen

# Clusterkopfschmerz

## Notizen

## **Linde Gas GmbH**

Linde Healthcare, Modecenterstraße 17, Objekt 2/1. OG, 1110 Wien  
Telefon 050 4273-2200, Fax 050 4273-2260, [www.ichatmelinde.at](http://www.ichatmelinde.at)

Linde ist ein Firmenname, der von Linde plc und den mit ihr verbundenen Unternehmen verwendet wird. Das Linde Logo und das Wort Linde sind Marken der Linde plc oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Copyright © 2024. Linde plc.